

# Snabbinstruktion för Mindray Beneheart C1A hjärtstartare



# Att använda Mindray hjärtstartare


## Översikt

Agera snabbt men lugnt om du tror att någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp. Om de finns någon annan person i närheten ber du denne att ringa **112** under tiden som du hämtar hjärtstartaren. Om du är ensam gör du så här:


1. Kontrollera patientens medvetande (*titta, lyssna, känn efter andning*).  
Om patienten är medvetslös och inte andas – RING 112.



2. Starta utrustningen. Öppna locket och följ röstinstruktionerna.

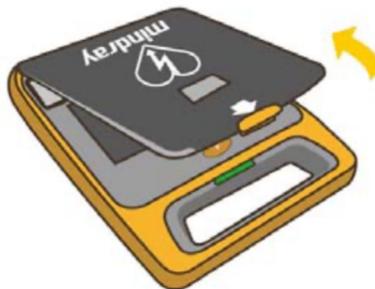


3. Kontrollera patientkategorin. Tryck lägesomkopplaren för vuxen/barn till vänster eller höger. Vuxen -8 år eller äldre eller över 25 kg, Barn – under 8 år eller under 25 kg.

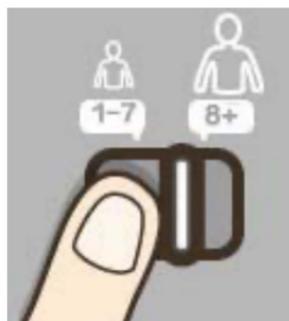

4. Förbered patienten. Exponera patientens bara bröstorg, se till att huden är ren och torr (torka eller raka bort brösthår om det behövs).




5. Fäst elektroderna på patienten enligt anvisningarna på elektroderna. För vuxen: En uppe till höger och en på vänster sida. För barn: en på framsidan i mitten av bröstkorgen och en på baksidan i mitten av ryggen.

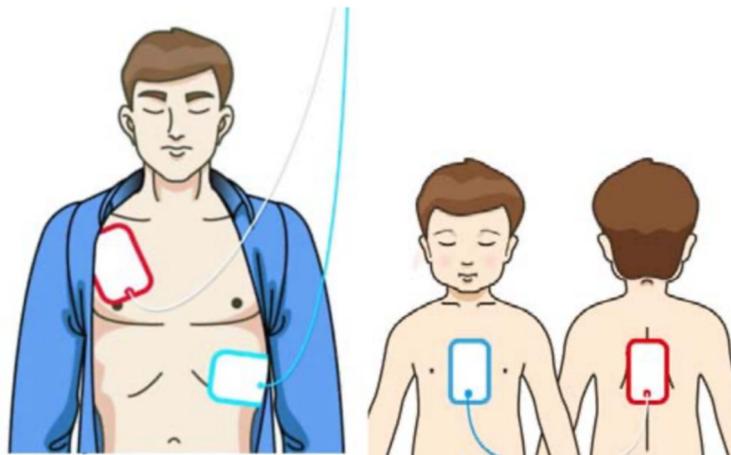

6. Analysera hjärtrytmen. Rör ej vid patienten, vänta på analysen.



7. Defibrillera om strömstöt rekommenderas. Tryck på strömstötknappen inom 30 sekunder. Om stöt inte rekommenderas, gå till steg 8.

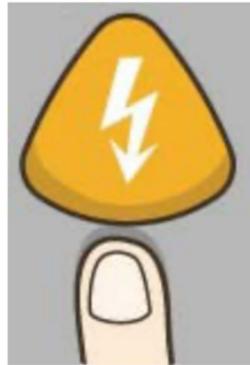

8. Utför HLR. Utför hjärt och lungräddning enligt anvisningarna. Om/när HLR-tiden går ut upprepar du steg 6. Vänta tills ambulanspersonalen kommer om patienten är vid medvetande och andas normalt.

